

## デントロ クリーンムース Q&A

### 開封後の保管方法は？

保管は常温で、直射を避けて保管してください。

又、お子様の手の届かない場所を選んで、保管してください。

### デントロ クリーンムースを間違えて飲み混んでしまいました。

沢山の水や牛乳を飲んで中和してから、必要に応じて、口腔内・喉もうがいして成分を落としてください。

無理に吐かせたりせず、体調が優れなかったり、違和感が残る場合は医師に相談してください。

### デントロ クリーンムースを洗い流さないまま、義歯を口腔内に装着してしまいました。

すぐに取り外して、うがいをして、入れ歯を良く洗ってください。

体調が優れなかったり、違和感が残る場合は医師に相談してください。

### デントロ クリーンムースの効果的な使用方法を教えてください。

取り外した入れ歯の唾液や食物残渣、汚れなどを流水で洗い落としてから、デントロ クリーンムースを良く振って、洗浄部に出して、1～2分静置してから義歯洗浄用ブラシを用いて洗浄してください。

洗い流しに温湯を使用すると「ぬめり」も素早く除去できます。

### 使ってはいけない入れ歯はありますか？

総入れ歯、部分総入れ歯、金具付き入れ歯、マウスピース等、すべての入れ歯に安心してお使い頂けます。