

デントロニクスの 寒天・アルジネート印象システム



豊富なコンポーネント

頼れるノウハウ

安心の品質



寒天・アルジネート印象を、システムで支える。

(1) 寒天印象材 デントロイド

長年のキャリアが磨き上げたデントロイドは、広範なニーズに対応する数多くの種類を取りそろえています。操作時間に余裕がある、マージンが見やすい、弾力性に優れる、アルジネートとの接着性が強い、ななシリンジに適した7mm径スモールスティックがある……さまざまな条件をデントロイドは満たしています。



デントロイド プロ (オールマイティタイプ)

ベテランのドクターに丁寧にお使いいただきたいタイプです。フローの良い軟らかな特性により、口腔内に注入すると細部にまで自然に流れ込みます。そして、弾性のある強い硬化により精密な印象採得ができます。落ち着いたブルーグレーの色調が、特にピンク色のアルジネートにマッチします。

カートロイド(カートリッジ)、レギュラー(5/16"径スティック)

●歯科用寒天印象材 ●管理医療機器 ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00066000 ●株式会社デントロケミカル製



デントロイド トリトン (高濃度の新世代標準タイプ)

プロにも似たフローの良さでスーパーグリーンに近い粘度を兼ね備えながら、価格は標準的。爽快感のあるきれいなブルーの色調は視認性が高く、アルジネートの色調も選びません。さまざまな要素がバランスよく調和した、新しい時代の寒天印象材です。

カートロイド(カートリッジ)、カセロイド(7mm径スモールスティック)、レギュラー(5/16"径スティック)

●歯科用寒天印象材 ●管理医療機器 ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00062000 ●株式会社デントロケミカル製



デントロイド スーパーグリーン (ポスト・コアに適した高濃度・高硬度タイプ)

デントロイドの中では寒天含有量が最も多く、硬化後のゲルの強度は最高です。口腔内での操作時間を上手にコントロールすることによって、強靱な印象を採得できます。石膏を多少ラフに注いでも変形しにくい、カチツとした硬さ。個性的な特性を持った、ハイグレードな寒天印象材です。

カートロイド(カートリッジ)、カセロイド(7mm径スモールスティック)、レギュラー(5/16"径スティック)

●歯科用寒天印象材 ●管理医療機器 ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00061000 ●株式会社デントロケミカル製



デントロイド ブラウン (多用途標準タイプ)

高い次元で性能のバランスがとれた、最も標準的なタイプ。多数歯からポスト印象まで幅広くこなし、どの部位の印象も不安なく採れます。口腔内の様々な状況に柔軟に対応できる、日常的に安心して使える寒天印象材です。茶色の色調も、たいへん落ち着いています。

カートロイド(カートリッジ)、カセロイド(7mm径スモールスティック)、レギュラー(5/16"径スティック)

●歯科用寒天印象材 ●管理医療機器 ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00064000 ●株式会社デントロケミカル製



デントロイド ブルー (ゆっくり操作できる軟らかタイプ)

水分を増やしたり寒天濃度を落とすのではなく、寒天素材の組合せで軟らかさを実現。デントロイクスの永年の経験が活かされています。口腔内の操作時間に余裕がある一方で、十分な強度も確保。ユニークな特性が光る、個性派の寒天印象材です。

カートロイド(カートリッジ)、カセロイド(7mm径スモールスティック)、レギュラー(5/16"径スティック)

●歯科用寒天印象材 ●管理医療機器 ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00065000 ●株式会社デントロケミカル製

※いずれも、カートロイドは56本入り、カセロイドは54本入り、レギュラーは60本入りです。

デントロイドの特性表	保温温度(°C)	口腔内操作可能時間	流動性(フロー)	ゲル弾力性(硬化後の折り曲げ強さ)	ゲル強度(硬化後のゲルの硬さ)	精度(デントロイド単体での目安)
プロ	56～60	長い	高い	高い	標準	高い
トリトン	58～60	長い	やや高い	やや高い	やや高い	やや高い
スーパーグリーン	58～63	短め	低い	やや高い	高い	高い
ブラウン	58～60	標準	標準	標準	標準	標準
ブルー	55～58	長い	高い	やや低い	やや低い	標準

(2) シリンジ

ななシリンジ

カートリッジ感覚の、適度な分量と軽快な操作。カセロイド(7mm径)使用、DRY/WETコンディショナー兼用。

パルシリンジ

レギュラー(5/16"径)使用、DRYコンディショナー専用。

ルックシリンジ

レギュラー(5/16"径)使用、WETコンディショナー専用。

カートシリンジ

カートロイド(カートリッジ)使用。


品名	寒天	コンディショナー	タイプ(色)	針	用途
ななシリンジ	カセロイド7mm	DRY または WET	3S (グリーン)	φ1.2×10mm	一般用
パルシリンジ	レギュラー5/16"	DRY	2S (ピンク)	φ0.8×10mm	一般用
			2L (ブルー)	φ0.8×17mm	ポスト印象用
			3S (グリーン)	φ1.2×10mm	一般用
			3L (グレー)	φ1.2×17mm	ポスト印象用
ルック	レギュラー5/16"	WET	2S (茶)	φ0.8×10mm	一般用
			2L (青)	φ0.8×17mm	ポスト印象用
			3S (緑)	φ1.2×10mm	一般用
			3L (灰)	φ1.2×17mm	ポスト印象用
カートシリンジ	カートロイド7mm カートリッジ	—	A セット	2S曲(φ0.8×10mm) 3S曲(φ1.2×10mm) 3S直(φ1.2×10mm)	一般用
			B セット	4S曲(φ1.5×10mm) 4S直(φ1.5×10mm)	一般用



- ななシリンジ ●ボディ材質/耐熱温度: PFA/260℃、その他材質/耐熱温度: PA11/145℃
 ●歯科印象材用シリンジ ●一般医療機器 ●医療機器届出番号 13B2X00051000012 ●城田電気炉材株式会社製
- パルシリンジ ●ボディ材質/耐熱温度: PFA/260℃、その他材質/耐熱温度: PA11/145℃
 ●歯科印象材用シリンジ ●一般医療機器 ●医療機器届出番号 13B2X00051000003 ●城田電気炉材株式会社製
- ルックシリンジ ●ボディ材質/耐熱温度: P1700/174℃、その他材質/耐熱温度: PA11/145℃
 ●歯科印象材用シリンジ ●一般医療機器 ●医療機器届出番号 13B2X00051230706 ●城田電気炉材株式会社製
- カートシリンジ ●歯科印象材用シリンジ ●一般医療機器 ●医療機器届出番号 13B2X00051000002 ●城田電気炉材株式会社製

(3) コンディショナー みずいらずF&F

容易な温度設定と正確な温度係留は、寒天・アルジネート印象の重要なポイントです。デントロニクスはカートリッジ用とシリンジ用、2つのドライタイプコンディショナーをご用意。スイッチを入れるだけの「かんたんフルオート機能」を1台に2セット搭載しました。ランプが緑色点灯している槽から使う。使い切ったら補充してスイッチを入れ直す。操作はたったこれだけです。ランプの色・点滅・点灯が、工程を示します。ストレージ温度は、58℃~67℃間で1℃毎のユーザー調整が可能です。清掃もユーザーの手で行なえます。

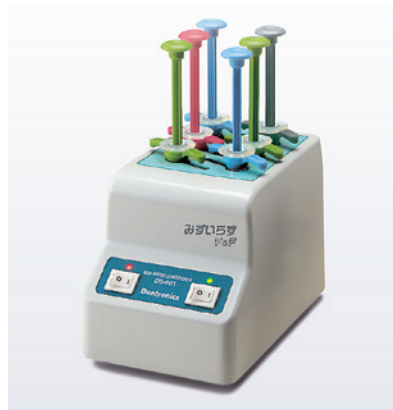

ななシリンジ/パルシリンジ用ドライタイプコンディショナー

みずいらずF&F DS-601

収容本数: シリンジ6本
 ストレージ温度: 64℃(工場出荷時)
 スタンバイ時間: 約55分
 電源/消費電力: AC100V 50/60Hz/160W
 外形寸法/重量: W114×D182×H122mm/2kg

- 歯科材料加温器 ●一般医療機器
 ●医療機器届出番号 13B2X00051000014
 ●城田電気炉材株式会社製



カートリッジ用ドライタイプコンディショナー

みずいらずF&F DC-1801

収容本数: カートリッジ18本
 保存温度: 64℃(工場出荷時)
 スタンバイ時間: 約45分
 電源/消費電力: AC100V 50/60Hz/160W
 外形寸法/重量: W114×D182×H122mm/1.7kg

- 歯科材料加温器 ●一般医療機器
 ●医療機器届出番号 13B2X00051000013
 ●城田電気炉材株式会社製

(4) その他の器材



印象材料練和器

クルクル2


回転速度を自由に変えられるフットコントローラーにより、両手が練和に使えます。手練りではただ混ぜるだけに終わりがちなアルジネートを、クルクル2はスパチュラの簡単な操作によって気泡少なくクリーミーに“練り”あげます。また、水の量を少なくしての固練りも、クルクル2なら手や腕が疲れることなく楽に行なえます。詳しくはカタログやウェブサイトをご覧ください。

電源/消費電力: AC100V 50/60Hz/90W

外形寸法: W138×D225×H200(ラバーボール装着時)

付属品: ラバーボール×2、スパチュラ、フットコントローラー

- 歯科用練成器具 ● 一般医療機器
- 医療機器届出番号 13B2X00051000011
- 城田電気炉材株式会社製

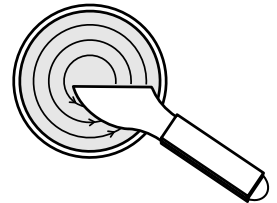

ポスト印象用補強ピン


ラジアルピンDX

細いステンレスワイヤーにナイロン繊維を植毛した、デントロニクスのオリジナル製品です。ポスト印象時の印象材の補強や、石膏注入時のポストのゆがみ防止に有効です。寒天印象にもシリコン印象にも対応します。

詳しくはカタログやウェブサイトをご覧ください。

赤(φ0.2)、緑(φ0.25)、黒(φ0.3)、アソート
各L100mm×20本入り

- 歯科用印象採得用器材 ● 一般医療機器
- 医療機器届出番号 13B2X00051000009
- 城田電気炉材株式会社製

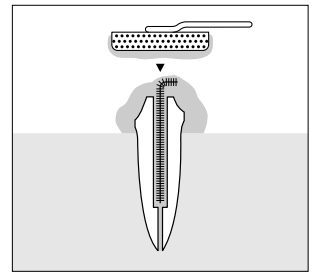


?! ヒント 「選べば、効果的。」

もう何年も、同じ寒天印象材をお使いではありませんか。
ゆっくり固まり操作時間がたっぷりある寒天、比較的早く固まり仕事が速い寒天、硬化後に強い弾力を持つ寒天、硬化後に高い強度を持つ寒天、すべてに中庸な特性の寒天……デントロニクスの寒天印象材デントロイドには役者が揃っています。条件に応じて複数の種類を使い分ければ、常に高品質の印象を採得することができます。
同様にシリンジも、目的やお手持ちのコンディショナーに合わせて最適なモデルをお選びいただけます。コンディショナーは、便利で使いやすいみずいらずF&F(ドライタイプ)へのチェンジをぜひご検討ください。


?! ヒント 「カートリッジか、シリンジタイプか。」

手頃な容量、スピーディーでディスプレイ感覚のカートリッジ。
たっぷり容量、経済的でエコ感覚のシリンジタイプ。
どちらにも良さがあります。その“いいとこ取り”をするのが、**カセロイド(7mm径スモールスティック寒天印象材)+ななシリンジ**です。
テフロン樹脂製のななシリンジは、コンパクトで圧出力も軽く滑らか。
カートリッジと同量の1.8ml寒天を、カートリッジ感覚でお使いいただけます。

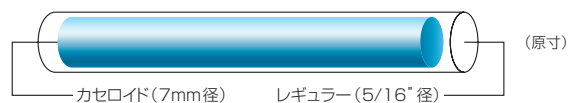

● 寒天印象材デントロイドに関する技術的なご質問は……

デントロイドコール ☎ 0120-05-8148 (フリーダイヤル、土日祝を除く9:00～17:00)

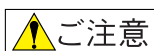

ご注意 ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、安全に、正しくお使いください。

発売元

Dentronics 株式会社 **デントロニクス**

〒162-0042 東京都新宿区早稲田町68 TEL (03)3209-7121 FAX (03)3232-6764 www.dentronics.co.jp

製造販売元 城田電気炉材株式会社 (製造販売業 13B2X00051) 〒165-0033 東京都中野区若宮2-55-3 TEL (03)3330-6370 FAX (03)3330-6332 www.shirota-denki.co.jp

製造販売元 株式会社デントロケミカル (製造販売業 13B2X10030) 〒198-0023 東京都青梅市今井3-2-12 TEL (0428)30-7450 FAX (0428)30-7460 www.dentrochemical.co.jp

● 写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。

● 仕様・外觀・価格は、予告なく変更することがあります。