

# Dentronics

計算なしで、正確な混水比に達します！

所定の表示数値になるまで、水を入れるだけです。

一台二役、高精度な重量計にもなります。

《電子混水比天びん》

# キチリ



# キチリ

《電子混水比天びん》

## キチリの特長

- 任意の量の粉(端数のあるg値で可)に水を加えていくだけで、正確な混水比に達します。
- 操作はとても簡単。もう電卓での計算は不要です。キチリへの混水比の入力・設定も、必要ありません。
- 高精度の重量計としてもお使いいただけます。0.1gから1,500gまで計れます。

## 仕様


	R1(レンジ1)	R2(レンジ2)	R3(レンジ3)
ひょう量	300g	600g	1,500g
最小表示	0.1g	0.2g	0.5g
%最小表示	0.1%		
100%最小質量	10g		
再現性(標準偏差)	0.1g	0.2g	0.5g
直線性	±0.1g	±0.2g	±0.5g
感度ドリフト	±20ppm/℃(10℃~30℃)		
表示	文字高16mm・7セグメント液晶表示、バックライト付き		
表示書簡時間	10回/秒		
動作温度・湿度範囲	-5℃~+40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)		
電源	ACアダプタ: AC100V(+10%、-15%)、約10VA		
計量皿上面寸法	W170mm×D133mm(計量皿はステンレス製)		
本体寸法	W190mm×D200mm(+水平器18mm)×H53mm		
本体重量	1.5kg		
付属品	ACアダプタ付き電源ケーブル、100cc水差し、透明ダストカバー、混水比表ステッカー(3枚)、取扱説明書、保証書		
その他	本体背面に水平器付き、足こまは高さ調節式		



混水比表ステッカーと100cc水差し(付属品)

## 標準価格

39,800円(1セット、税別)

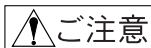

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、安全に、正しくお使いください。


発売元

**Dentronics** 株式会社 **デントロニクス**


〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-15 TEL: 03-3209-7121 FAX: 03-3232-6764

www.dentronics.co.jp


## キチリの操作と練和

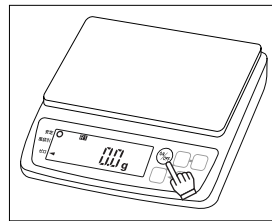


- 【1】  
電源ケーブルをコンセントにつなぎ、ON/OFFキーを押して電源を入れる。

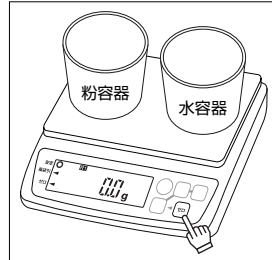

- 【2】  
容器を載せ、ゼロキーを押して、風袋引きをする。  
(粉と水の容器を一つで兼用する場合も、同様になります。風袋引きをすると、容器の目方は0.0gと表示されます。)

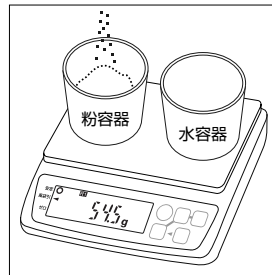


- 【3】  
粉容器に、必要量の粉を入れる。  
(粉の目方は、どんな半端な数値でもかまいません。この図では、54.5gの粉を入れています。)

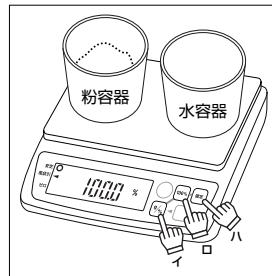

- 【4】  
g/%キーを押して、単位をgから%に変換(イ)。続けて100%キーで、その重さを100%に設定(ロ)。粉の量に変更がなければ、確定キーを押して確定(ハ)。  
(確定キーを押す前なら、g/%キーを押して【3】から再開し、粉の量を変更できます。通常は、イ、ロ、ハをボンボンボンと押すだけです。)



- 【5】  
液晶文字表示が所定の表示数値(粉100%+水の指定%)になるまで、水容器に水を加えて、計量は終了。  
(容器が一つの場合は、粉を入れた容器に水を加えます。左図は、混水比33%あるいは0.33と表記された粉の表示数値133です。水でなく専用液を使用する場合は、別途計算式によります。)

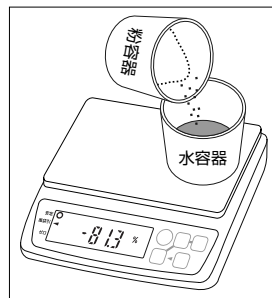

- 【6】  
粉容器の粉を水容器に移して、よく練り合わせる。  
(容器が一つの場合は、そのまま練り合わせます。)

- 写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。
- 仕様・外觀等は、予告なく変更することがあります。