

《寒天印象材用ドライタイプコンディショナー》

## みずいらず F&F

Full Auto Full Auto

### かんたん、フルオート。

- スイッチを入れるだけのかんたん Full Auto ユニットが、1台に2セット。
- 左右ユニットの寒天を交互に使いされば、数切れの心配や溶解不良の不安がありません。
  - めんどろな移し換えは、もちろん不要です。
  - ユーザーの手で清掃できます。



DS-601 (シリンジ用)

DS-601 には弊社製ななシリンジとパルシリンジが適合します。

DC-1801 (カートリッジ用)

# みずいらずF&F

《寒天印象材用ドライタイプコンディショナー》

## ●2つのタイプ

みずいらずF&Fは、シリンジ用のDS-601とカートリッジ用のDC-1801の2種。機能、操作、価格はまったく同じです。

※シリンジ用のDS-601には、弊社製品ななシリンジ(7ミリ径)とパルシリンジ(5/16インチ径)が適合します。ルック(5/16インチ径)は不適合です。

## ●かんたんな操作

ランプが緑色点灯している槽から使う。全部使い切ったら補充してスイッチを入れ直す。……操作はたったこれだけです。

(1) 左右それぞれの槽にシリンジ/カートリッジを入れ、それぞれのスイッチを入れます。

※スイッチを入れてから約55分後(DS-601)/約45分後(DC-1801)には早くもストレージ状態(ランプが緑色点灯)になります。

(2) ランプが緑色点灯に変わったら、いつでも使用可能です。

※ランプが赤色点滅・赤色点灯・緑色点滅している槽の寒天は、まだ使用できません。

(3) 全数使いきった槽は、次に備えてシリンジ/カートリッジを補充し、スイッチをいったん切ってからまた入れ直します。

## ●メンテナンス

ディーラーやメーカーに依頼しなくても、ユーザーの手で槽内を清掃できます。

(1) 本体底面にある小蓋のネジ(1本)を取り、小蓋を外します。

(2) 左右の槽の底蓋のネジ(各2本)を取り、底板を外します。

(3) 布きれなどを槽の孔に通して、汚れを落とします。

## 仕様

電源 ..... AC100V 50/60Hz

消費電力 ..... 160W

ストレージ温度 ..... 工場出荷時64℃

※58℃~67℃間で1℃毎10段階のユーザー調整が可能です。

収容本数 ..... シリンジ6本(DS-601)、カートリッジ18本(DC-1801)

※DS-601で使用できる弊社製シリンジは、ななシリンジとパルシリンジです。ルックは使用できません。

外形寸法 ..... W114 × D182 × H122mm

重量 ..... 2.0kg(DS-601)、1.7kg(DC-1801)


## 標準価格(税別)

DS-601(シリンジ用) ..... 82,000円

DC-1801(カートリッジ用) ..... 82,000円

●歯科材料加温器 ●一般医療機器

●医療機器届出番号13B2X00051000014(DS-601)/13B2X00051000013(DC-1801)

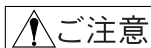

ご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、安全に、正しくお使いください。

発売元

**Dentronics** 株式会社 **デントロニクス**

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-15 TEL (03) 3209-7121 FAX (03) 3232-6764

www.dentronics.co.jp

製造販売元

**SHIROTA** 城田電気炉材株式会社 (業許可番号: 13B2X00051)

〒165-0033 東京都中野区若宮2-55-3 TEL (03) 3330-6370 FAX (03) 3330-6332

www.shirota-denki.co.jp

●写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。

●仕様・外觀・価格は、予告なく変更することがあります。