

《歯科印象材用シリンジ DRY専用》

## パルシリンジ 5/16

テフロンで、スムーズ。



## テフロンだから、動き滑らか。

使いやすさと高い品質はそのままに、より丈夫で滑らかなテフロン樹脂を採用しました。

テフロン樹脂特有の自己潤滑性により、これまで以上にスムーズな動きを実現しています。

持ちやすく、押しやすく、清掃も容易なデザインです。針のサイズ別に、4つのカラーが用意されています。

## パルシリンジの種類と仕様

2S (ピンク)	..... 針径 0.8 mm	..... 針長 10 mm	..... 一般用
2L (ブルー)	..... 針径 0.8 mm	..... 針長 17 mm	..... ポスト印象用
3S (グリーン)	..... 針径 1.2 mm	..... 針長 10 mm	..... 一般用
3L (グレー)	..... 針径 1.2 mm	..... 針長 17 mm	..... ポスト印象用

外形寸法 / 重量 ..... φ26×幅54×縮長116mm / 30g

ボディ材質 / 耐熱温度 ..... PFA / 260℃

その他材質 / 耐熱温度 ..... PA11 / 145℃

## パルシリンジの上手な使い方

- (1) ヘッド部のキャップを外します。
- (2) ピストンを抜きます。
- (3) 寒天を挿入します。
- (4) ノズルから寒天が数ミリ出るまで [註]、ピストンで押し込みます。
- (5) ノズルから出た寒天を捨て、キャップを閉めます。
- (6) ドライタイプのコンディショナーにセットして暖めます。

[註]


コンディショナーで温めているとき、シリンジ内に残った空気や寒天に含まれる空気の膨張によってピストンが外に押し出されることがあります。これはテフロンシリンジの高い潤滑性によるものですが、寒天をノズルから少し出るまで押し込むことによって空気が排出され、トラブルは生じません。それでもなおピストンが押し出される傾向は残りますが、なんら問題ありません。極く少量のワセリンを、定期的にボディとヘッドのねじ込み部分とオーリングに塗布することをお薦めします。

## 標準価格


7,200円 (各サイズ、1本、税別)

別売部品 (税別)

ボディ	..... (共通)	..... 3,800円 (1個)
ヘッド (キャップ付き)	..... (各色)	..... 3,500円 (1個)
キャップ	..... (各サイズ)	..... 800円 (1個)
ホルダー	..... (各色)	..... 500円 (1個)
ヘッドパッキン	..... (共通)	..... 1,600円 (10個)
オーリング	..... (共通)	..... 1,500円 (10個)

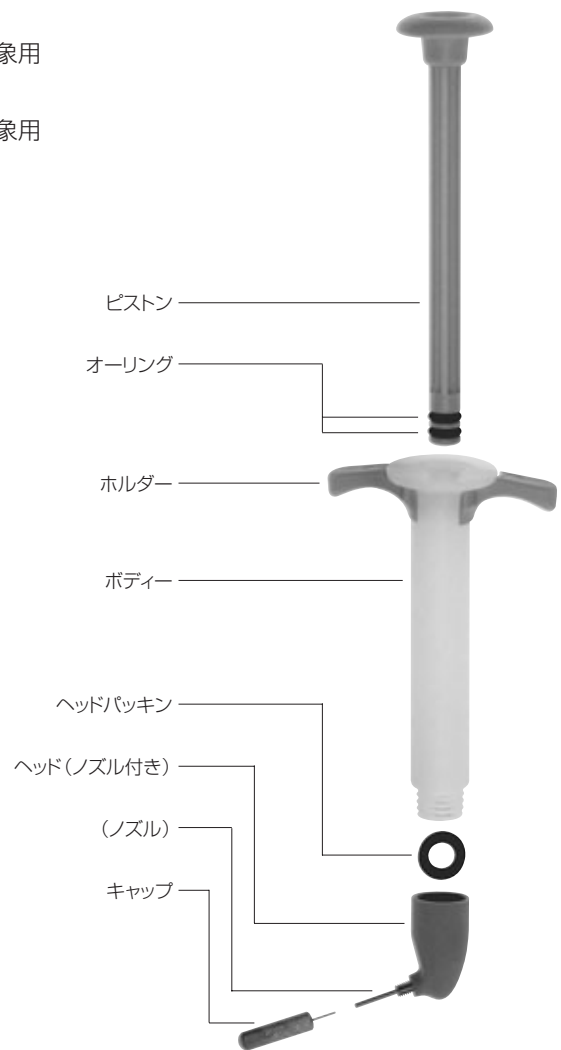

● 歯科印象材用シリンジ ● 一般医療機器  
● 医療機器届出番号 13B2X00051000003

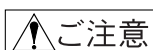

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、安全に、正しくお使いください。

発売元

**Dentronics** 株式会社 **デントロニクス**

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-15 TEL (03) 3209-7121 FAX (03) 3232-6764  
www.dentronics.co.jp

製造販売元

**SHIROTA** 城田電気炉材株式会社

〒165-0033 東京都中野区若宮2-55-3 TEL (03) 3330-6370 FAX (03) 3330-6332  
www.shirota-denki.co.jp (製造販売業 13B2X00051)

● 写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。  
● 仕様・外觀・価格は、予告なく変更することがあります。