

《印象材補強ピン》

ラジアルピンDX

ポスト印象時の補強に。

弾性に優れるステンレスワイヤーに、ナイロン繊維を植毛。


赤、緑、黒、ポスト孔に合わせた3種類の太さ。

1ケースで120～170歯分の経済性。



- 弾性に優れる細いステンレスワイヤーに、ナイロン繊維をきれいな放射状に植毛してあります。
- ステンレスワイヤーの弾性によって、印象採得時や石膏注入時のピンの曲がりがありません。
- ポスト孔の径に合わせて、3種類の太さが赤・緑・黒の色分けで用意されています。
- 寒天印象にもシリコン印象にも対応する、デントロニクスのオリジナル製品です。

使い方

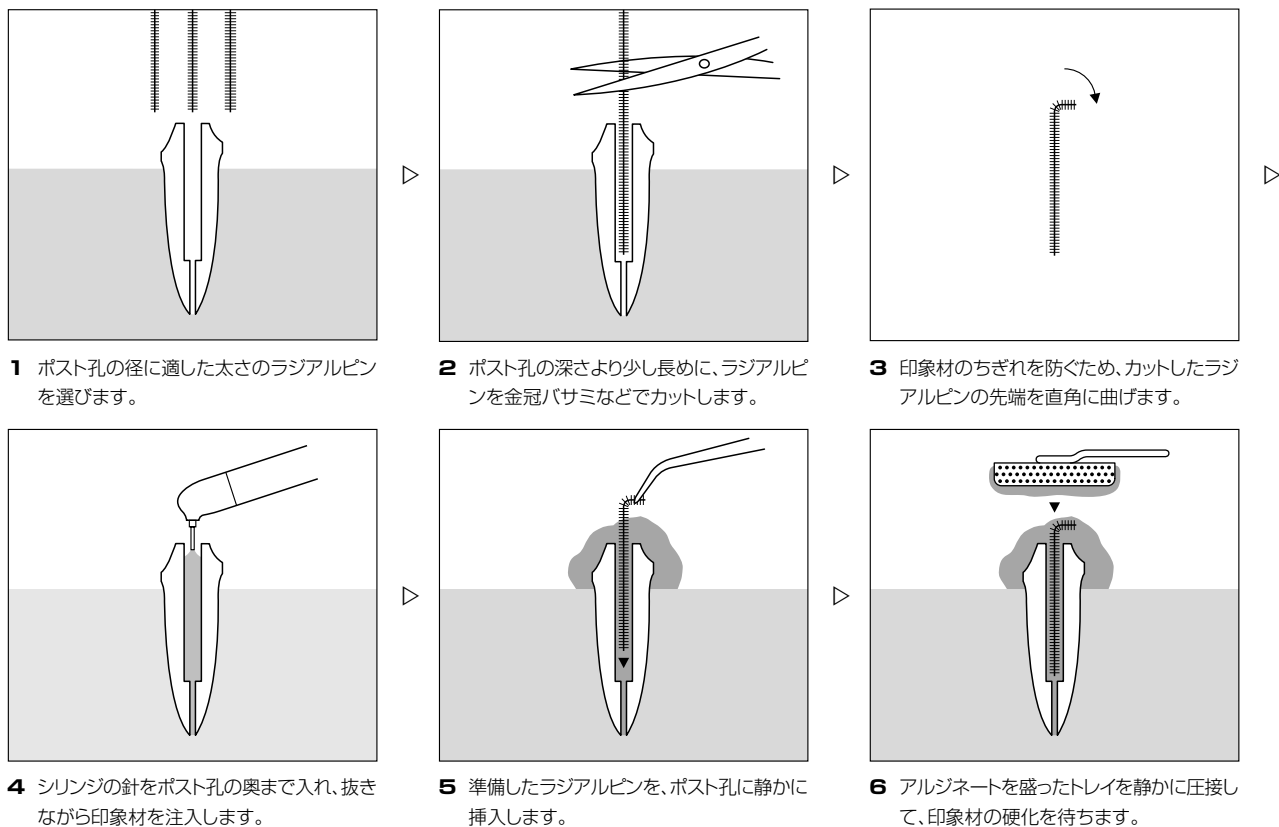

1 ポスト孔の径に適した太さのラジアルピンを選びます。

2 ポスト孔の深さより少し長めに、ラジアルピンを金冠バサミなどでカットします。

3 印象材のちぎれを防ぐため、カットしたラジアルピンの先端を直角に曲げます。

4 シリンジの針をポスト孔の奥まで入れ、抜きながら印象材を注入します。

5 準備したラジアルピンを、ポスト孔に静かに挿入します。

6 アルジネートを盛ったトレイを静かに圧接して、印象材の硬化を待ちます。


仕様

	ステンレスワイヤーの直径	長さ
赤(細)	φ0.2mm	100mm
緑(中)	φ0.25mm	100mm
黒(太)	φ0.3mm	100mm

標準価格

- 赤、緑、黒 2,800円(20本、透明プラスチックケース入り、税別)
- アソート 2,800円(赤7本+緑6本+黒7本=計20本、透明プラスチックケース入り、税別)

● 医療機器届出番号 13B2X00051000009

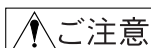

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、安全に、正しくお使いください。

発売元

Dentronics 株式会社 **デントロニクス**

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-15 TEL (03) 3209-7121 FAX (03) 3232-6764
www.dentronics.co.jp

製造販売元

SHIROTA 城田電気炉材株式会社 (業許可番号: 13B2X00051)

〒165-0033 東京都中野区若宮2-55-3 TEL (03) 3330-6370 FAX (03) 3330-6332
www.shirota-denki.co.jp

- 写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。
- 仕様・外觀・価格は、予告なく変更することがあります。