

《ストレートタイプ ポスト印象用補強ピン》

ラジアルピンDX

ポスト印象時の補強に。

弾性に優れるステンレスワイヤーに、ナイロン繊維を植毛。

赤、緑、黒、ポスト孔に合わせた3種類の太さ。


1ケースで120～170 歯分の経済性。



ラジアルピンDX 〈ストレートタイプ ポスト印象用補強ピン〉

- 弾性に優れる細いステンレスワイヤーに、ナイロン繊維をきれいな放射状に植毛してあります。
- ステンレスワイヤーの弾性によって、印象採得時や石膏注入時のピンの曲がりがありません。
- ポスト孔の径に合わせて、3種類の太さが赤・緑・黒の色分けで用意されています。
- 寒天印象にもシリコン印象にも対応する、デントロニクスオリジナル製品です。

使い方

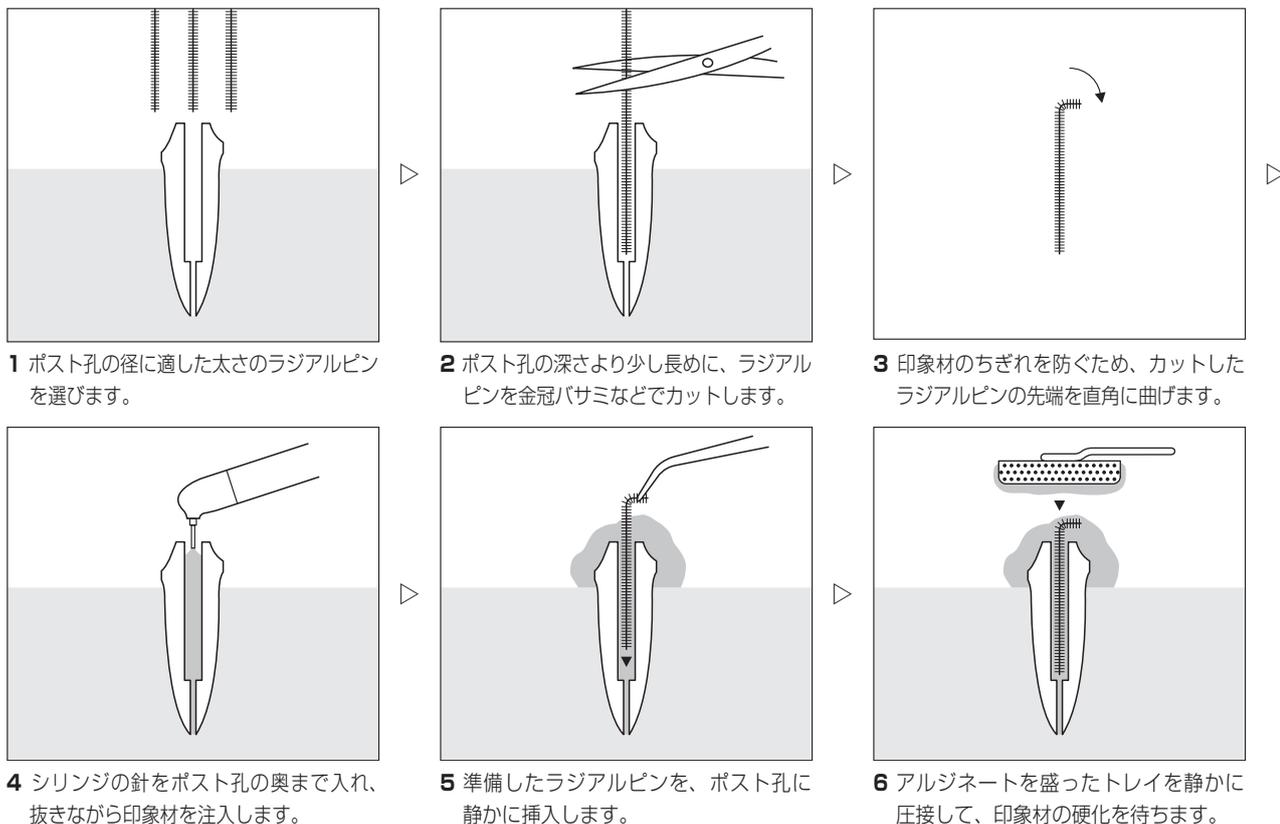

1 ポスト孔の径に適した太さのラジアルピンを選びます。

2 ポスト孔の深さより少し長めに、ラジアルピンを金冠バサミなどでカットします。

3 印象材のちぎれを防ぐため、カットしたラジアルピンの先端を直角に曲げます。

4 シリンジの針をポスト孔の奥まで入れ、抜きながら印象材を注入します。

5 準備したラジアルピンを、ポスト孔に静かに挿入します。

6 アルジネートを盛ったトレイを静かに圧接して、印象材の硬化を待ちます。

仕様

	ステンレスワイヤーの直径	長さ
赤（細）	φ 0.2mm	100mm
緑（中）	φ 0.25mm	100mm
黒（太）	φ 0.3mm	100mm

標準価格

- 赤、緑、黒 3,400 円（20 本、透明プラスチックケース入り、税別）
- アソート 3,400 円（赤 7 本 + 緑 6 本 + 黒 7 本 = 計 20 本、透明プラスチックケース入り、税別）

● 歯科用印象採得用器材 ● 一般医療機器 ● 医療機器届出番号 13B2X00051000009



ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、安全に、正しくお使いください。

発売元

Dentronics 株式会社 **デントロニクス**

〒162-0042 東京都新宿区早稲田町 68 TEL (03)3209-7121 FAX (03)3232-6764
www.dentronics.co.jp

製造販売元

SHIROTA 城田電気炉材株式会社（製造販売業 13B2X00051）

〒165-0033 東京都中野区若宮2-55-3 TEL (03)3330-6370 FAX (03)3330-6332
www.shirota-denki.co.jp

- 写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。
- 仕様・外観・価格は、予告なく変更することがあります。